

Oxymetr PRINCE na zápěstí



Výrobní číslo



Měkká prstová sonda



Prostor pro baterie

Graf pulsu


Hodnota SpO2 kyslíku v krvi

Hodnota tepové
frekvence

Pletysmografická
křivka



Obrazovka pro
sledování hodnot

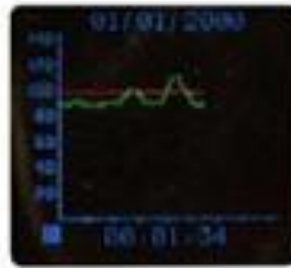

Obrazovka pro
zobrazení trendů



Obrazovka pro
nastavení



1. Po vložení prstu do sondy se přístroj automaticky spustí.
2. Krátkým stiskem tlačítka ■ se přepínají obrazovky na displeji.
3. Dlouhým stiskem tlačítka ■ se spustí obrazovka pro nastavení. Parametry se nastavují pomocí tlačítka ▲.