

Návod k použití elektrod (sterilizovatelně)

Popis/použití:

Tyto nástroje jsou znovupoužitelné a jsou dodávány nesterilní. Před první použitím nástroje očistěte a vysterilizujte. Tyto nástroje jsou určeny k použití pouze s kabely a elektrochirurgickými jednotkami se kterými jsou kompatibilní. Použití těchto nástrojů umožňuje přenést elektrický proud z elektrochirurgické jednotky a kabelů do místa operace a tím dosažení požadovaného chirurgického efektu.

Opětovné použití:

Garantujeme, že naše produkty vydrží minimálně 20 sterilizačních cyklů, pokud je sterilizace prováděna v souladu s instrukcemi schválenými v tomto návodu. Opatrné zacházení může prodloužit životnost.

Kontraindikace:

Tyto nástroje nesmí být nikdy použity v případě, že:

- Nástroj je z venku viditelně poškozený. Jedná se zejména o to, jestli není prasklá izolace či poškozen konektor.
- Nástroje neprojdou zde popsanou prohlídkou.
- V přítomnosti hořlavých plynů, tekutin či v kyslíkem obohaceném prostředí.

Bezpečnostní rady:

- Nastavte nejnižší možný výkon, který postačuje k dosažení kýženého chirurgického efektu.
- Nikdy nedovolte, aby se kabely připojené k těmto nástrojům dostaly do kontaktu s pokožkou pacienta v době, kdy dojde k aktivaci operačního procesu.
- Nikdy nedovolte, aby byly kabely v blízkosti jiných elektrických zařízení.
- Umístěte nepoužívané nástroje na odizolovaná místa, například do pouzder.
- Před použitím zkontrolujte a vyzkoušejte každý nástroj.
- Vyraďte nástroje, které přesáhly svou dobu použitelnosti.
- Aktivace elektrochirurgického nástroje, který není v kontaktu s určenou tkání nebo není v pozici pro koagulaci může, způsobit kapacitní vazbu.

Kontrola:

Tyto nástroje je třeba zkontrolovat před a po každém použití. Je třeba vizuálně prohlédnout, jestli není nástroj fyzicky poškozen.

Vizuální kontrola zahrnuje následující:

- Prasklý, zlomený nebo jakkoliv zkřivený nástroj.
- Zlomené nebo značně ohnuté kontakty v konektoru.
- Poškození včetně prořezání, propíchnutí, vrubů, oděrů, neobvyklých bouří, výrazné změny barvy.
- U pinů jde o poškození, korozi nebo nesouosost.

Čištění:

Odstraňte pomocí nekovového měkkého kartáče, jemného čistícího prostředku a destilované vody veškeré nečistoty, které se usadily v průběhu použití nástroje. Důkladně osprchujte sterilní vyčištěnou vodou dokud neodstraníte veškeré zbytky a nečistoty a posléze jemně vysušte pomocí sterilního hadříku. (Nepoužívejte zcela do tekutiny.)

Tecno Instruments (Pvt) Ltd.
316-C Small Industrial Estate
Sialkot-51340

Upatření:

- Neseškrabujte nebo nedrhněte potažený povrch brusivem.
- Při čištění kouřové trubice nepoužívejte kartáč.
- Neprekryvejte nástroje při vkládání do sterilizačních zásobníků.
- Nenamáčejte potažené nástroje v CIDEXu či jiné žiravině pro sterilizaci za studena.
- Nepoužívejte bělidlo.
- Nepokládejte potažené nástroje do ultrazvukové čističky.

Sterilizace:

Zabalte každý pár nástrojů zvlášť nebo jej umístěte tak, aby se nedotýkal jiných nástrojů.

- STEAM: parním autoklávem na teplotu 250°F/121°C po dobu 20 minut.
- FLASH: parním autoklávem na teplotu 275°F/134°C po dobu 10 minut.
- Plyn (ETO): řiďte se pokyny výrobce jednotky, kterou používáte.
- Pre-Vac: parním autoklávem na teplotu 270°-273°F/132°-135°C, doba expozice 4 minuty, sušení 20 minut.

Nepoužívejte nástroje, pokud nejsou zcela chladné. Pro dosažení maximální doby použitelnosti doporučujeme použít ETO sterilizaci.

Uchovávání a manipulace:

Bipolární a monopolární elektrody musí být uloženy v čistém, chladném a suchém prostředí. Ochraňte je před mechanickým poškozením a přímým slunečním světlem. Zacházejte s nimi s maximální opatrností.

Záruka:

Záruka se vztahuje na materiál a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním nástrojů. V průběhu použití a přípravě pro opětovné použití musí být s produkty nakládáno s maximální obezřetností.



Čtete návod k použití



Nesterilní



Nevystavujte slunečnímu záření



Udržujte v suchu



Teplotní omezení



Neobsahuje latex

Distributor:

KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o.
Božkovská 38, 326 00 PLZEŇ - Slovany