

THERMALIS BAHNO 400 ml / 500 g

Výzkum a inovace podle tisícileté termální tradice.

PRO DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH VÝROBCÍCH NAVŠTIVTE NAŠE
WEBOVÉ STRÁNKY WWW.THERMALIS.IT



Výrobní řada THERMALIS vznikla v oblasti zasvěcené kvalitě života a jeho zlepšení. Výrobky jsou jedinečné pro aplikační metody a použité látky a materiály, blízké přírodě a trvale udržitelné. Naše zdravotnické prostředky jsou podporovány výzkumem nejvyšší úrovně.

00 z 21/10/2015

REV : 00 del 21/10/2015

REF 306



Značka CE



Přečtěte si pokyny k používání



Kód výrobku



Datum expirace



Číslo série



Recyklovatelný



Nevyhazovat do
odpadu



Čistá váha



Výrobce

THERMALIS BAHNO 400 ml / 500 g (BIO BAHNO)

Zdravotnický prostředek CE 770228/R s hypertermální vodou z Eugenské termální pánve (BTE).

VŠEOBECNÉ INFORMACE – Je známo, že léčivá bahna z Eugenské termální pánve, bohatá na soli jódu a bromu, svým osmotickým účinkem přírodní cestou tiší bolest a zastavují záněty a podporují detoxikaci. Aktivuje se krevní oběh, což má regenerativní a blahodárný účinek na tkáň.

ORIGINALITA A JEDINEČNOST PRODUKTU – Vychází ze známých vlastností hojivého bahna, THERMALIS vyvinul hypertermální **THERMALIS BAHNO / BIO BAHNO**, které se vyznačuje zvláště vysokou kvalitou, jež je výsledkem vědeckých výzkumů s cílem zvýšení účinnosti hojivých bahen. Biofango / bio bahno se skládá z vybrané hlíny s lamelovou strukturou a hypertermální vody z Eugenské termální pánve, pocházející z jedné z nejhlubších geotermických studní v dané oblasti, a je obohacena speciálním extraktem z vodních řas. Výrobek je vhodný na podporu nesčetných léčivých kúr. Léčivé bahno se může používat podle potřeby studené nebo horké a svůj účinek rozvine při nejrůznějších ošetřeních. Balení je dimenzované tak, aby se Biofango mohlo použít i k samostatnému ošetření určitých tělesných partií. Dermatologicky testováno. Pro výrobek byly použity minerální látky přírodního původu, a proto se může používat i při známé alergii na nikl.

APLIKACE STUDENÉHO NEBO HORKÉHO PRODUKTU: Otevřete sáček a bahno naneste ve vrstvě tlusté asi 1 cm přímo na tělesnou partii, která se má ošetřit. Zamezte kontaktu s kovovými předměty. Nechte působit asi 40 minut a dobře opláchněte.

POKYNY PRO POUŽITÍ STUDENÉHO LÉČIVÉHO BAHNA – Termální hypotermie je vhodná při problémech kloubů, svalů a šlach, u otoků a podlitin. Časté použití nachází studené bahno u přímých a nepřímých poranění při sportovních nehodách (smolné pravidlo). **Aplikace:** Sáček vložte do chladničky, aby se bahno ochladilo na teplotu přibližně 5 – 10 °C. Ke zvýšení účinku doporučujeme použití termální soli THALASSO. Dbejte příslušných pokynů.

POKYNY PRO POUŽITÍ HORKÉHO BAHNA THERMALIS – Použití tohoto zdravotnického prostředku za horka je v první řadě vhodné na podporu léčení revmatu (především k prevenci recidivy) a při bolestivých onemocněních svalového a kosterního systému. **Aplikace:** Sáček vložte do horké vody a ohřívejte ve vodní lázni, nebo potřebné množství vložte do keramické misky a zahřejte v mikrovlnné troubě. Horké bahno přiveďte k teplotě přibližně 39 – 40 °C. Musíte dávat pozor, aby bahno nebylo příliš horké, aby nedošlo ke spáleninám. Bahno naneste podle výše uvedeného popisu, zakryjte vodotěsnou fólií a přikryjte vlněnou nebo teplou dekou, aby se teplota udržovala konstantní. Ke zvýšení účinku se doporučuje použití termální soli THALASSO. Dbejte příslušných pokynů k používání. Doporučeno je nejméně deset aplikací, z nich prvních pět ve dnech po sobě jdoucích (jedna denně), a dalších pět každý druhý den.

POKYNY: Výrobek ukládejte v chladnu a suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením a tepelnými zdroji. Přechovávejte mimo dosah dětí. Nenanášejte na poraněnou kůži ani na otevřené rány. Pouze pro vnější aplikaci.

Zamezit kontaktu s očima a ústy. V případě kontaktu důkladně omývat velkým množstvím tekoucí vody. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti vůči obsaženým látkám. Při podráždění kůže již nepoužívat. Nepolykat.

Datum trvanlivosti se vztahuje na výrobek v uzavřeném originálním obalu při správném skladování. Výrobce nepřebírá ručení za škody, které vznikly uživateli nesprávným používáním a/nebo používáním, jež se odchyľuje od použití popisovaného na příbalovém letáku. Po uplynutí data trvanlivosti již nepoužívejte. Neobsahuje konzervační prostředky.

Po otevření přechovávejte v chladničce a spotřebujte do deseti dnů.

BALENÍ: Uzavíratelné sáčky 400 ml / 500 g.