

THERMALIS KAPKY 15 x 5 ml

Výzkum a inovace podle tisícileté termální tradice.

PRO DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH VÝROBCÍCH NAVŠTIVTE NAŠE
WEBOVÉ STRÁNKY WWW.THERMALIS.IT



Výrobní řada THERMALIS vznikla v oblasti zasvěcené kvalitě života a jeho zlepšení. Výrobky jsou jedinečné pro aplikační metody a použité látky a materiály, blízké přírodě a trvale udržitelné. Naše zdravotnické prostředky jsou podporovány výzkumem nejvyšší úrovně.

00 z 21/10/2015

REV : 00 del 21/10/2015

REF 305



Značka CE



Přečtěte si pokyny k používání

REF

Kód výrobku



Datum expirace

LOT

Číslo série



Recyklovatelný



Nevyhazovat do
odpadu

e

Čistá váha



Výrobce

HYPERTERMÁLNÍ VODA Z TERMÁLNÍ EUGENSKÉ PÁNVE (BTE)

VŠEOBECNÉ INFORMACE – hypertermální voda z termální eugenské pánve s příměsí solí jódu a bromu obsahuje sodík, chlor, brom, jód a další důležité minerální látky, které jsou nepostradatelné pro biochemické procesy v těle.

Originalita a jedinečnost produktu

REV: 00 21/10/2015

Hypertermální voda THERMALIS pochází z jedné z nejhlubších geotermálních studní v Eugenské termální pánvi a je podstatnou součástí všech produktů. Její osmotický účinek dovoluje regeneraci fyziologického stavu sliznic.

THERMALIS plní hypertermální vodu z vlastní studny do ampulí a sprejů bez plynu.

UZAVÍRATELNÉ AMPULE – Zdravotnický prostředek na bázi hypertermální vody z Eugenské termální pánve (BTE).

Hypertermální voda podporuje léčení onemocnění horních cest dýchacích. Termální kúry v otorinolaryngologické medicíně (ORL – krční, nosní, ušní) přispívá fyziologicky:

- k odstraňování a zkapalnění sekrece nosu,
- k ochraně nosních sliznic před drážděním, způsobeným nečistotami,
- k ústupu otoku sliznice,
- k aktivaci chloupků,
- k normalizaci sliznic dýchacích cest.

Výrobek je vhodný také k používání v aerosolové terapii. Neobsahuje konzervační prostředky. Nemá farmakologický ani metabolický účinek, jde o fyziologický a přírodní produkt. Izotonická voda díky příměsí chloru a sodíku. Vhodný též pro ošetření dětí.

POUŽITÍ: Výplach nosu se dá uskutečnit zcela jednoduše a bezpečně pomocí inhalačních přístrojů nebo v manuální aplikaci. Před použitím zatřepat.

- Ampuli otevřete otáčivým pohybem.
- Otvor ampule opatrně zavedte do nosní dírky.
- Potom ampuli stiskněte a současně vdechněte nosem.
- Produkt nechte působit několik vteřin a postup opakujte s druhou nosní dírkou.

Použití s inhalačním přístrojem:

- Ampuli otevřete točivým způsobem.
- Obsah ampule naplňte do inhalačního přístroje a dbejte přitom pokynů výrobce.

Má-li se ampule zase zavřít, otočte víčkem a zatlačte na otvor.

Po otevření se musí ampule použít do 12 hodin a přechovávat podle pokynů.

Dávkování a trvání ošetření doporučí odborný nebo praktický lékař.

DÁVKOVÁNÍ: Podle potřeby jednou až třikrát denně vstříknout jednou až dvakrát do každé nosní dírky. Pokyny: Výrobek ukládejte v chladnu a suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením a tepelnými zdroji. Přechovávejte mimo dosah dětí. Při podráždění kůže přestaňte používat. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti vůči obsaženým látkám. Datum trvanlivosti se vztahuje na výrobek v uzavřeném originálním obalu při správném skladování. Výrobce nepřebírá ručení za škody, které vznikly uživateli nesprávným používáním a/nebo používáním, jež se odchyluje od použití popisovaného na příbalovém letáku. Po uplynutí data trvanlivosti již nepoužívejte. Nepolykat.

BALENÍ: blistr s 15 ampulemi o 5 ml, uzavíratelné.