

THERMALIS SPREJ 150 ml

Výzkum a inovace podle tisícileté termální tradice.

PRO DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH VÝROBCÍCH NAVŠTIVTE NAŠE
WEBOVÉ STRÁNKY WWW.THERMALIS.IT



Výrobní řada THERMALIS vznikla v oblasti zasvěcené kvalitě života a jeho zlepšení. Výrobky jsou jedinečné pro aplikační metody a použité látky a materiály, blízké přírodě a trvale udržitelné. Naše zdravotnické prostředky jsou podporovány výzkumem nejvyšší úrovně.

00 z 21/10/2015

REV : 00 del 21/10/2015

REF	303	REF	Kód výrobku
CE	Značka CE	Info	Přečtěte si pokyny k používání
Hourglass	Datum expirace	LOT	Číslo série
Recycling	Recyklovatelný	e	Čistá váha
Waste	Nevyhazovat do odpadu	Factory	Výrobce

HYPERTERMÁLNÍ VODA Z TERMÁLNÍ EUGENSKÉ PÁNVE (BTE)

VŠEOBECNÉ INFORMACE – Hypertermální voda z termální eugenské pánve s příměsí solí jódu a bromu je bohatá na sodík, chlor, brom, jód a jiné důležité minerální látky, které jsou nepostradatelné pro biochemické procesy v těle.

ORIGINALITA A JEDINEČNOST PRODUKTU – Hypertermální voda THERMALIS pochází z jedné z nejhlubších geotermických studní v Eugenské termální pánvi a je podstatnou součástí všech produktů. Její osmotický účinek dovoluje regeneraci fyziologického stavu sliznic. THERMALIS plní hypertermální vodu z vlastní studny do ampulí a sprejů bez plynu.

SPREJ K VYPLACHOVÁNÍ NOSU – Zdravotnický prostředek CE 789393/R na bázi hypertermální vody z Eugenské termální lázně (BTE). Výplachy nosu Eugenskou termální vodou, obsahující jodo-bromové soli, mají nesčetné pozitivní účinky:

- Odstranění hlenu, povlaků a jiných nečistot, nalézajících se v nosních cestách.
- Ústup otoku a zvlhčení sliznice, takže se nos opět uvolní a vedlejší nosní dutiny mohou být správně provzdušňovány.
- Zlepšení čištění nosu rychle se pohybujícími chloupky, které posouvají uvolněný hlen z vedlejších nosních dutin k hrtanu.
- Mechanické vyplachování alergenů.

Vhodné k vyplachování nosních cest u kuřáků a osob, které při své práci přicházejí do styku se znečišťujícími látkami a/nebo jemnými prachy. Neobsahuje konzervační prostředky. Nemá farmakologický ani metabolický účinek, jde o fyziologický a přírodní produkt. Izotonická voda díky přísadce chloru a sodíku.

POUŽITÍ: Sprej držte rovně a rozstříkovací hlavu zaveďte do nosní dírky. Stiskněte knoflík rozstříkování a současně vdechněte nosem. Postup opakujte s druhou nosní dírkou. Před použitím protřepejte.

DÁVKOVÁNÍ: Podle potřeby jednou až třikrát denně a stříknout jednou až dvakrát do každé nosní dírky.

INFORMACE: Výrobek ukládejte v chladnu a suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením a tepelnými zdroji. Přechevávávejte mimo dosah dětí. Při podráždění kůže přestaňte používat. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti vůči obsaženým látkám. Doporučeno pro osobní používání. Datum trvanlivosti se vztahuje k výrobku v uzavřeném originálním obalu při správném skladování. Výrobce nepřebírá ručení za škody, které vznikly uživateli nesprávným používáním a/nebo používáním, jež se odchyluje od použití popisovaného na příbalovém letáku. Po uplynutí data trvanlivosti již nepoužívejte. Nepolykejte.

BALENÍ: sprej bez plynu 150 ml.