

## Dodatek pro letecké cestování s přístrojem SimplyGo

**PHILIPS**  
**RESPIRONICS**

Přístroj SimplyGo se může používat při cestách letadlem. Před odjezdem se přesvědčte, že jste si zabalili:

- Plně nabitou baterii (a pro delší cestu záložní baterie)
- Napájecí zařízení na střídavý proud a napájecí kabel
- Napájecí zařízení na stejnosměrný proud
- Přepašovací brašnu
- Vozík

Také si nezapomeňte s sebou vzít telefonní čísla na svého poskytovatele domácí zdravotní péče a lékaře pro případ nouzové situace.

Všechny letecké společnosti mají předpisy upravující cestování s přenosnými koncentrátory kyslíku, jako je váš přístroj SimplyGo. Některé letecké společnosti nepovolují jejich používání na palubě svých letadel za letu. Při rezervaci letenky se nezapomeňte letecké společnosti zeptat na její předpisy ohledně používání přístroje SimplyGo za letu. Aktuální informace o leteckém cestování s vaším přístrojem naleznete na našem webu: [www.philips.com](http://www.philips.com).

Při letech na domácích linkách i do zahraničí mohou mít komerční letecké společnosti neobvyklé požadavky na používání koncentrátorů kyslíku. Dříve než se vydáte na cestu, kontaktujte všechny letecké společnosti na všech návazných letech a požádejte o povolení k přepravě systému SimplyGo na palubě. Nezapomeňte se zeptat, jaké dokumenty si s sebou musíte vzít.

Zkontrolujte, že baterie přístroje je plně nabitá a že nabití vydrží po celou dobu trvání letu. Pokud vám letecká společnost dovolí připojení ke zdroji proudu v letadle, může vás požádat, abyste z přístroje vyndali baterii, i když přístroj SimplyGo neumožňuje dobíjení baterie s připojeným leteckým kabelem.

V den letu si naplánujte včasný příjezd na letiště. Bezpečnostní služba letiště může potřebovat více času k odbavení vašich zavazadel a kyslíkového systému. Také vás mohou požádat, abyste přístroj SimplyGo vyjmuli z přepravní brašny ke kontrole.

Respironics Inc.  
1001 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668, USA



Respironics Deutschland  
Gewerbestrasse 17  
82211 Herrsching, Německo



0123

Čeština